

WatchPAT[®] ONE

בדיקת דום נשימה בשינה ביתית לשימוש חד פעמי



לסרטון הדרכה שלב אחר שלב יש להיכנס לאתר

watchpatone-howtouse.com

WatchPAT[®] ONE

בדיקת דום נשימה בשינה ביתית לשימוש חד פעמי



אם יש לך שאלות כלשהן ניתן
לפנות למוקד התמיכה של
איתמר[®] מדיקל בטלפון:
1-888-748-2627

מדריך למשתמש שלב אחר שלב

itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com

יש לסרוק את קוד ה-QR שלהלן כדי להוריד את
האפליקציה WatchPAT[®] ONE



itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com

איתמר מדיקל בע"מ
רחוב חלמיש 9, ת.ד. 3579,
פארק תעשייתי קיסריה, 3088900, ישראל
טלפון: 04-6275598, פקס: 04-6177000

Arazy Group GmbH
The Squire 12, Am Flughafen
Frankfurt am Main 60549
Germany



הערות חשובות:

- טמפרטורות אחסון ותפעול 0°C - 40°C
- אין לנסות לחבר או לנתק אף חלק מהיחידה.
- אין לנסות להכניס כל חפץ זר ליחידה.
- בשום פנים ואופן אין לנסות לחקן בעיה בעצמך.
- ה-WatchPAT[®] ONE לא אמור לגרום לכל סוג של אי נוחות או כאב. במידה ונוצרת אי נוחות בלתי נסבלת, יש להסיר את המכשיר ולהתקשר למוקד התמיכה.

סימון מידע טכני

לשימוש חד פעמי, אין לעשות שימוש חוזר	
מגבלת טמפרטורה 0°C - 40°C	
יש לעיין בהוראות השימוש	
מתח הפעלה של הסוללה 1.5V DC	
הגנה מפני חדירה	
סוג BF למכשיר שבא במגע עם הגוף	
מספר היחידה של ועדת התקשורת הפדרלית	
יצרן מכשיר רפואי	
מספר קטלוגי	
מספר סידורי	
תאריך ייצור	
לשימוש עד	
המוצר מסומן בלוגו CE 2797 עבור BSI	
נביע מורשה בקריילה האירופית	
על פי הנחיות ההוראה ה-WEEE 2012/19/EU, יש לאסוף פסולת חשמלית ואלקטרונית (EEE) בנפרד ואין להשליכה יחד עם פסולת ביתית רגילה. נא להשליך מוצר זה על כל חלקיו באופן אחראי וידידותי לסביבה.	
שכיר, יש להחזיר בזוהרות	
יש לשמור יבש	

REF-0M2135494 - Edition 2

ניתן למצוא סרטון הדרכה שלב אחר שלב
בכתובת watchpatone-howtouse.com




מדריך זה כולל הסבר שלב אחר שלב של אופן השימוש הנכון בבדיקת דום הנשימה בשינה הביתית WatchPAT® ONE.

לפני התחלת השימוש ב-WatchPAT® ONE:

- ➔ מומלץ לשים את מכשיר ה-WatchPAT® ONE על היד הלא דומיננטית שלך.
- ➔ ניתן לשים את האצבעון על כל אצבע, למעט האגודל.
- ➔ לפני השימוש יש להסיר בגדים צמודים, טבעות, שעוני יד ותכשיטים אחרים.
- ➔ יש להסיר לק וציפורניים מלאכותיות מאצבע הבדיקה ולוודא שהציפורן קצוצה.

הערה: יש להשתמש רק בסוללת AAA אלקליין.
אין להכניס את הסוללה עד שיגיע הזמן ללכת לישון.

1. לפני התחלת מחקר השינה יש לוודא שיש לך גישה לאינטרנט, את מכשיר הטלפון שלך, מכשיר ה-WatchPAT® ONE וקוד ה-PIN שלך.

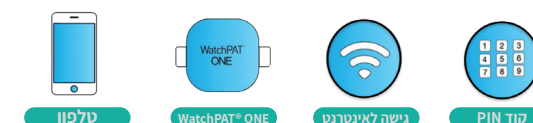

טלפון WatchPAT® ONE גישה לאינטרנט PIN קוד

2. יש להוריד את האפליקציה WatchPAT® ONE למכשיר הנייד שלך (ניתן להשיגה בחנויות האפליקציות Apple App Store ו-Google Play Store).



3. יש לפתוח את האפליקציה WatchPAT® ONE ולאשר את כל ההרשאות הנדרשות על ידי האפליקציה. הרשאות אלה נחוצות כדי שהאפליקציה תפעל.


יש להוציא את המכשיר WatchPAT® ONE מהקופסה. אפשר ללחוץ על הכפתור "סיור" באפליקציה כדי לערוך סיור מהיר, שיראה לך כיצד להתקין את המכשיר.

סיור

לאחר הסיום יש ללחוץ על הכפתור "מוכן".

מוכן


4. יש להכניס את הסוללה למכשיר ה-WatchPAT® ONE.

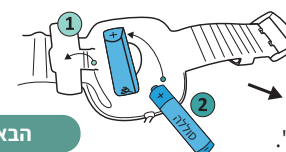

הבא

לאחר הסיום יש ללחוץ על "הבא".

5. יש להסיר שעון יד ותכשיטים מיד הבדיקה.

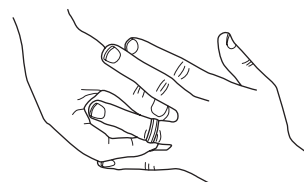

לאחר הסיום יש ללחוץ על "הבא".

הבא


6. יש להזין את קוד ה-PIN בן 4 הספרות שקיבלת מהמרפאה או מהספק, וללחוץ על "הזנה".



יש להזין קוד PIN
יש להזין את ארבע הספרות של קוד ה-PIN שקיבלת (מספר זיהוי אישי) ולהקיש על "הזנה".

הזנה

7. יש לשים את מכשיר ה-WatchPAT® ONE על היד הלא דומיננטית שלך. יש לוודא שהוא לא צמוד מדי ולא רופף מדי.

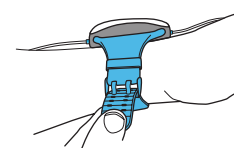

הבא

לאחר הסיום יש ללחוץ על "הבא".

8. יש לקחת את חיישן החזה (חיישן נחירות ותנוחת הגוף) ולהשחיל את הכבל דרך השרוול עד שהוא יוצא דרך פתח הצוואר. יש להסיר את הלשונית מהמדבקה ולהצמיד את החיישן בדיוק מתחת לשקע עצם החזה שלך.




הבא

לאחר הסיום יש ללחוץ על "הבא".

* אם מכשיר ה-WatchPAT® ONE שלך אינו כולל את חיישן החזה, יש לדלג על שלב זה.

9. יש להכניס את אחת האצבעות של היד הלא דומיננטית לתוך האצבעון עד הסוף. אפשר להשתמש בכל אצבע למעט האגודל.

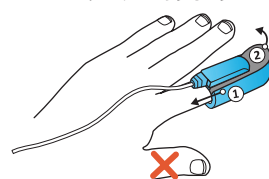

הבא

לאחר הסיום יש ללחוץ על "הבא".

10. הכל מוכן. כמה צעדים אחרונים לפני התחלת מחקר השינה שלך:

- א. יש לוודא שהטלפון שלך נמצא במרחק של לא יותר מ-5 מטרים ממכשיר ה-WatchPAT® ONE.
- ב. יש לכבות את כל שאר המכשירים המשרדים בחדר, כגון טלפונים חכמים אחרים, שעוני יד חכמים ואוזניות, כיוון שהם עלולים לשבש את הבדיקה.
- ג. יש לחבר את הטלפון למטען, ועליו להישאר מחובר לחשמל לאורך כל הלילה. אם יש צורך לקום במהלך הלילה, יש להשאיר את הטלפון מחובר לחשמל, אין צורך לשאת אותו איתך.

כעת יש ללחוץ על הכפתור "התחלה" כדי להתחיל את מחקר השינה שלך.

התחלה

11. עם ההתעוררות בבוקר, יש ללחוץ על הכפתור "סיום הקלטה" ולהמתין מספר דקות עד שהמכשיר ישלים את העברת הנתונים. לאחר שהעברת הנתונים תושלם, תתקבל הודעת תודה.

סיום הקלטה

לאחר שהתקבלה ההודעה יש ללחוץ על "סגירת האפליקציה".

סגירת האפליקציה

12. יש להסיר את חיישן החזה, האצבעון ומכשיר ה-WatchPAT® ONE. אין צורך לשמור את המכשיר או להחזירו. אפשר פשוט להשליך אותו.